


Bedienungsanleitung

Wichtig: Bei allen gelieferten SUPROhand Schienen ist die Verstärkungsschiene für die **rechte** Hand eingestellt.

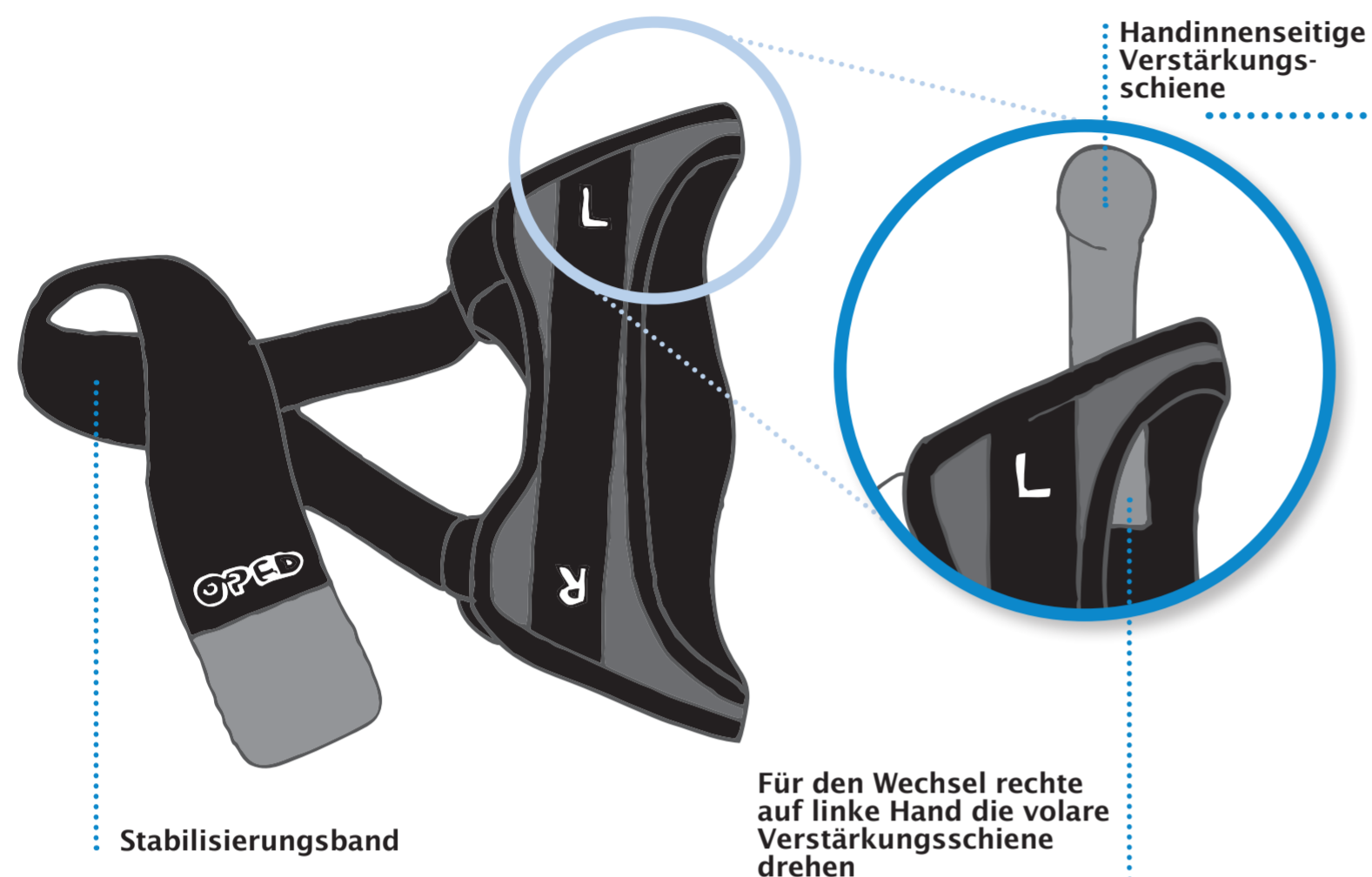

Vorbereitung


1 Umrüsten von rechts auf links

Wird die SUPROhand Schiene für die linke Hand verwendet, muss die handinnenseitige Verstärkungsschiene am dafür vorgesehenen Schlitz herausgenommen und umgedreht werden.

2 Die kurze, gebogene Seite muss immer in Richtung Fingerspitze zeigen. Achten Sie darauf, dass sie nachher von beiden Seiten mit Stoff umschlossen ist. (R = Rechts, L = Links)

Anlegevorgang

- 1 Schlüpfen Sie mit der Hand in die SUPROhand Schiene.
- 2 Legen Sie das Stabilisierungsband über den Unterarm zum Körper hin und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss an der gewünschten Position.

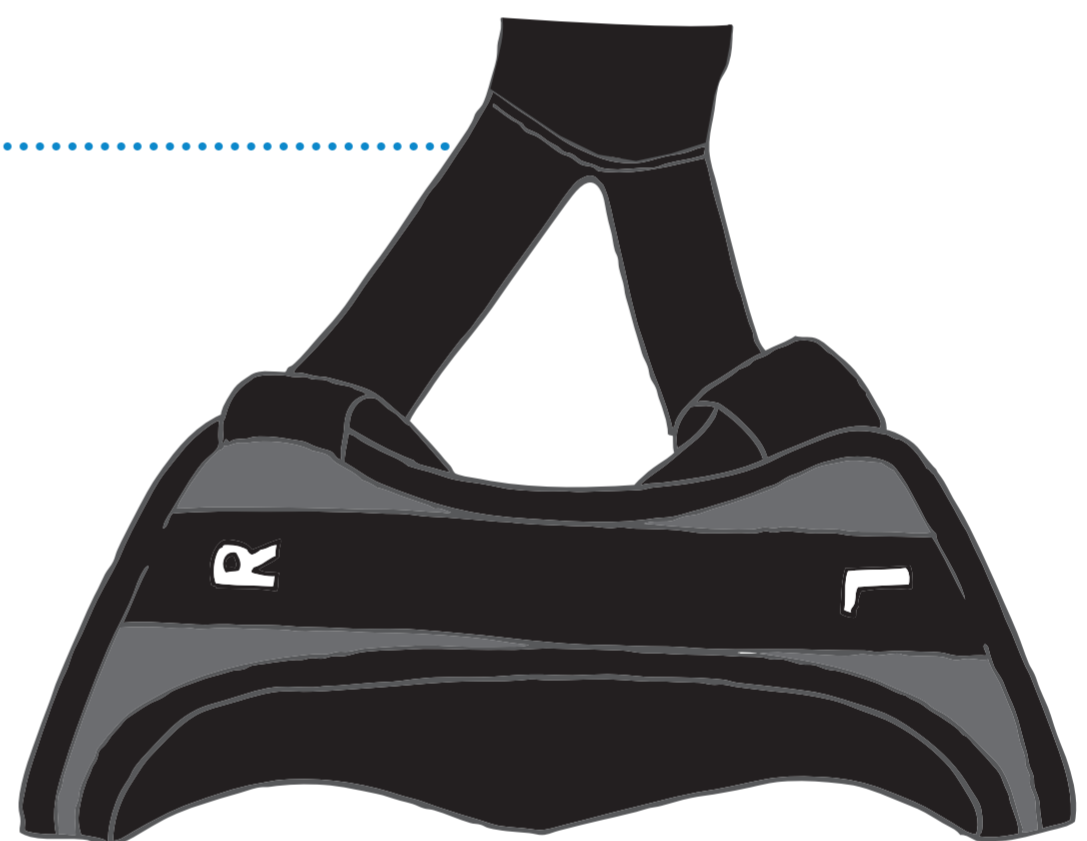

Perfekte Anpassung

- 1 SUPROhand sollte einen festen, stabilisierenden Sitz an Ihrer Hand aufweisen ohne unangenehm zu drücken.
- 2 Die handinnenseitige Verstärkungsschiene kann bei Bedarf gebogen werden, um sich optimal an die Patientenhand anzupassen.

Grösse 1 = Handgelenkumfang unter 17 cm, **Grösse 2** = Handgelenkumfang über 17 cm