


Vorbereitung

1 Schale vorbereiten


- ⚡ Tipp: Gurte zu einer Schlaufe zusammen kletten, damit sie später nicht stören

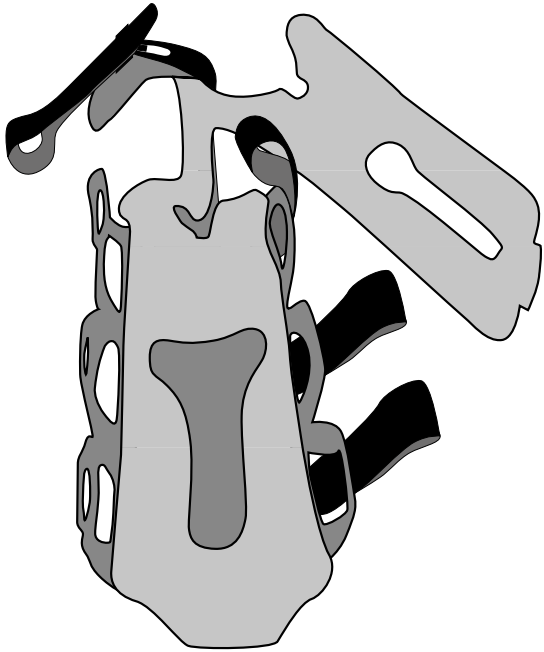


Für linken Arm

2 Handbreite auf max. Breite einstellen

- ⚡ Schraube wieder schliessen, Griffhöhe nicht verstellen

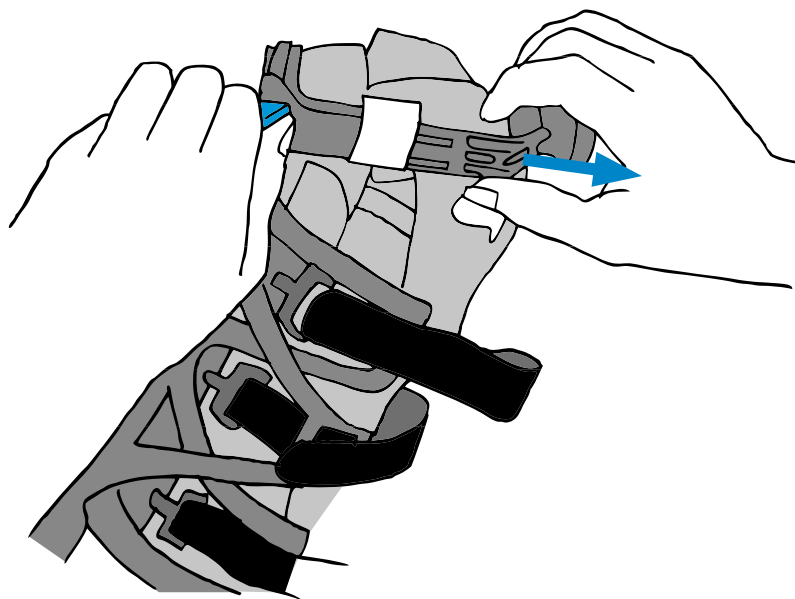

3 Armbezug (Stoff) anlegen

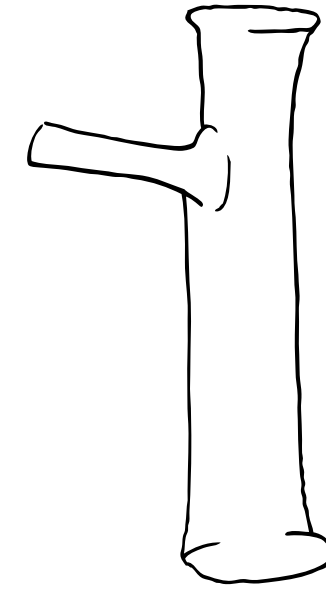


Größen	Umfang Handgelenk (Messung über Knöchel am unverletzten Gelenk)
S	13,5 - 15,5 cm
M	15,0 - 19,0 cm
L	18,5 - 25,0 cm


Anlegevorgang

1 Wenn möglich Faustschluss

- ⚡ Tipp: Hand am Ellenbogen bis zur richtigen Position schieben

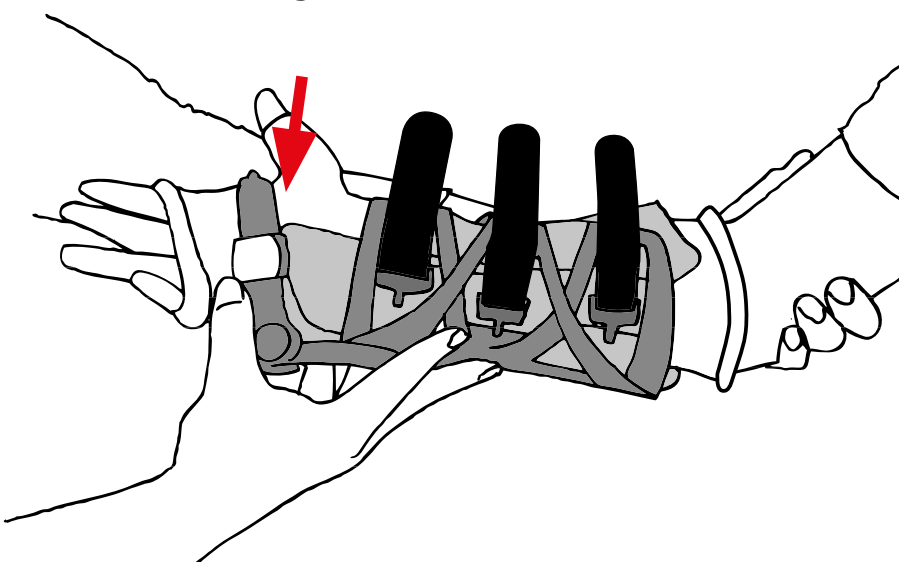


2 Beim Schliessen der Gurte Reihenfolge beachten

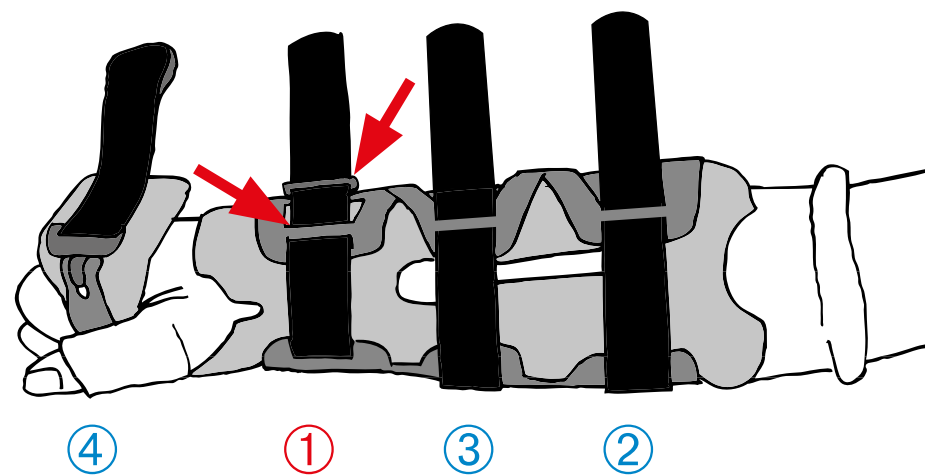


3 Handbreite anpassen

- ⚡ Tipp: Länge nur bei Bedarf korrigieren

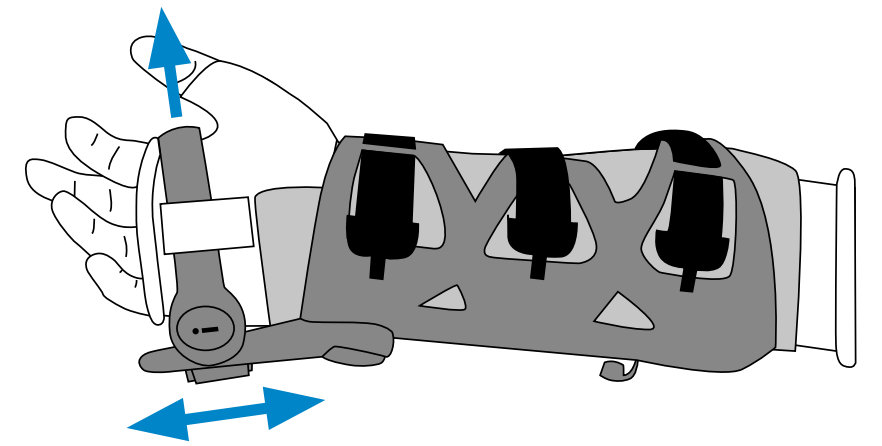


4 Vakuumkissen belüften (Ventil auf) Anschliessend Vakuum wieder erzeugen (Pumpe)

- ⚡ Gurte nochmal nachziehen

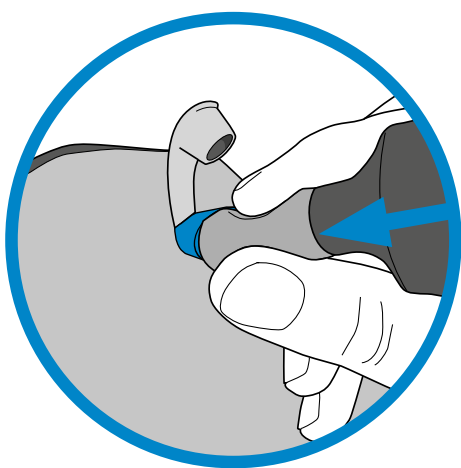


5 Winkel auf gewünschte Position einstellen

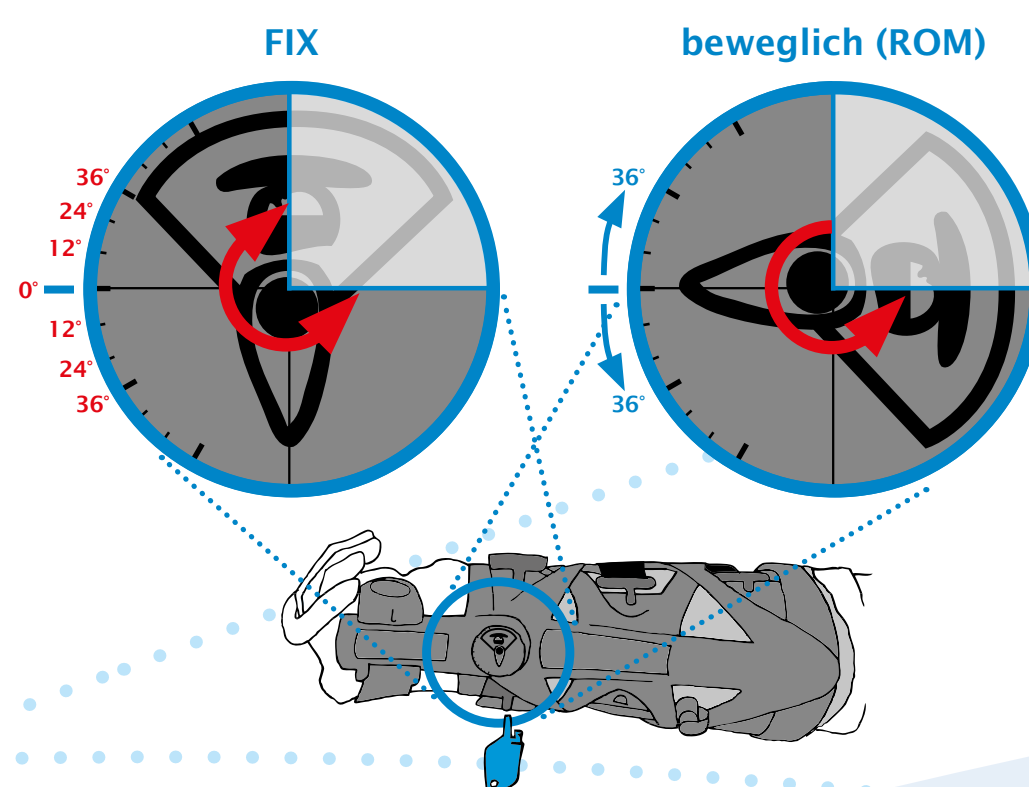

Fertig

Frottee über die Enden der VACOhand ziehen

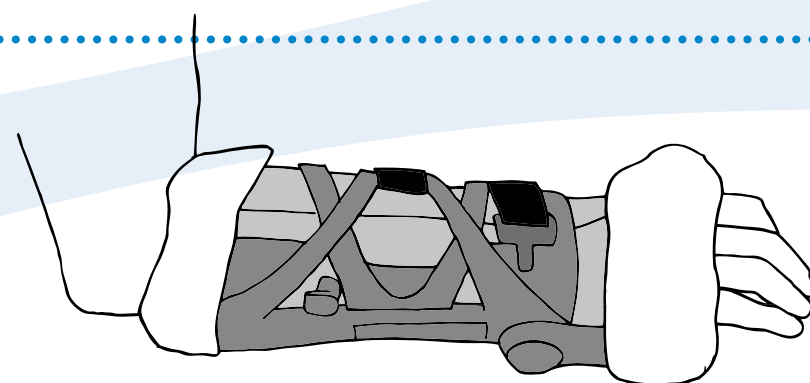

Ein Produkt aus dem OPED Handkonzept.

